

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수인22-4026호
- 품목명: 단기 사용 환기용 기관용 튜브

작성연월 : 2022년 01월 12일

■ 사용목적

단기적 사용을 목적으로 기도의 확보, 흡입 마취약 투여 등 환기를 위해서 구강 또는 비강을 통하여 기관 내에 삽입하는 튜브

■ 보관 또는 저장방법

실온보관 (직사광선을 피하고, 건조한 곳에 보관한다.)

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전에 포장에 손상이 손상되었거나 개봉되지 않았는 지 확인한다.

나. 사용방법

- 1) 제품의 포장을 개봉하고, 제품의 삽입이 원활하도록 제품 끝에 수용설 젤을 발라주고, 이때 튕(내부)가 막히지 않도록 주의한다. (*수용성윤활제: 병원에서 사용되는 일반제품으로 본 제품의 구성품이 아님)
- 2) 시술하고자 하는 한쪽의 비공을 선택하여, 경사 튕을 비강 중격쪽으로 향하게 하여 기도를 확보할 수 있도록 삽입하여 위치시킨다.
- 3) 삽입을 할때 저항이 느껴지는 경우, 기도에서 본 제품을 제거하여 반대편 비공에 삽입한다.
- 4) 플랜지(튜브의 끝에 연결된 커넥터부분)이 코 바깥쪽(콧구멍)에 닿을 때까지 삽입하여 제품을 위치시킨다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 1) 일회용 의료기기이므로 사용 후, 지정된 수거용기에 폐기한다.

■ 사용시주의사항

가. 사용시 주의사항

- 1) 제품을 사용하기 전에 적절한 크기를 선택한다.
- 2) 무균유지를 확인할 수 있도록, 포장이 개봉되어 있거나 손상되지 않은지 확인하여 사용한다.
- 3) 제품을 사용하기 전에 매뉴얼을 확인하여 사용하여, 심각한 또는 치명적인 질병 또는 부상을 초래할 수 있는 부적절한 사용을 방지하도록 한다.
- 4) 유효기간이후의 제품은 사용하지 않도록 한다.
- 5) 본 제품은 일회용제품이므로 제품을 재사용하지 않도록 한다. 재사용 할 경우 환자에게 위험할 수 있다.

나. 금기

- 1) 다음 사항에 해당될 경우, 제품을 사용하지 않도록 한다.
 - 비강 감염

- 코의 기형
- 비정상적인 항응고제
- 심각한 머리부상이나 얼굴 부상을 입은 환자 또는 NPA(해당 튜브)가 뇌 조직으로 의도하지 않게 침투할 수 있기 때문에 두개골골절이 의심될 경우에 사용불가

다. 부작용

- 1) 식도로 삽입될 시, 환자의 구토를 유발할 수 있으므로 이를 주의하여 기도로 삽입한다.
- 2) 과한 삽입으로 코에 출혈이 나지 않도록 주의한다.
- 3) 튜브가 구부러지거나 막히지 않게 주의한다.
- 4) 지나치게 긴 튜브는 식도를 지날 수 있으며 이 경우, 폐포저환기 증후군이나 위의 팽창을 유발할 수 있으므로 주의한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)