

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신15-1178호
- 품목명: 지혈대

작성연월 : 2025년 01월 03일


■ 사용목적

환자의 사지를 묶을 수 있는 끈이나 지혈만을 하는 튜빙 등으로 구성된 기구

■ 보관 또는 저장방법

습기가 없고 건조한 곳에 보관


■ 사용방법

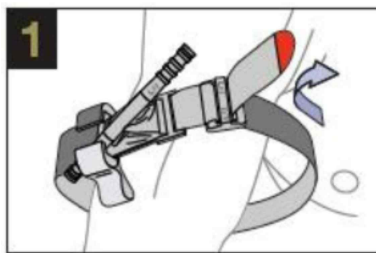

두 손 착용법:


밴드, 버클의 슬릿을 통해 빨간 팁을 끼워 2-3인치 여유를 두고 감는다.

OR

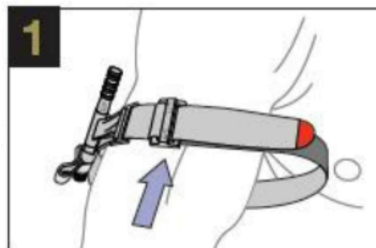


한 손 착용법:


루프를 통해 2-3 인치 여유를 두고 출혈부위 환부에 직접 삽입한다.

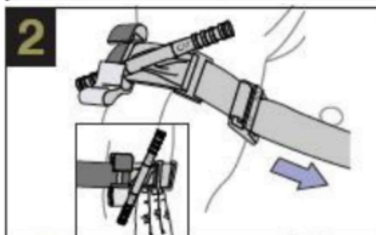


밴드를 당겨 2번 그림과 같이 지혈봉과 클립을 위쪽으로 위치시킨다. 밴드는 흘러 내리지 않도록 밴드와 환부 사이에 3개 이상의 손가락이 들어가지 않도록 조인다.

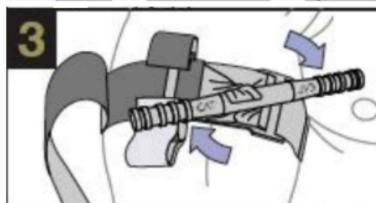

출혈이 멈출 때 까지 지혈봉을 돌린다.

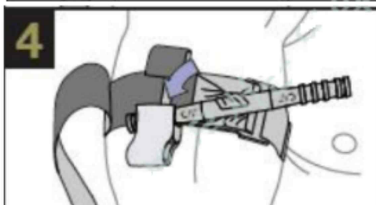

지혈봉을 클립에 끼워 고정한다. 출혈 및 맥박을 확인한다. 출혈 및 맥박의 이상이 있는 경우 지혈봉을 풀러 다시 착용한다.

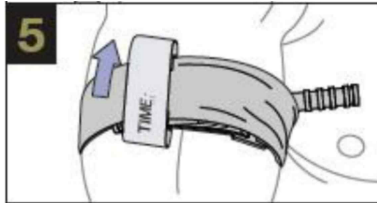

밴드로 클립을 덮고, 시간을 기록한다.

■ 사용시 주의사항

1. 반드시 의료인 또는 지혈대 사용에 대한 교육을 받은 사람이 사용 할 것.
2. 지혈대를 장시간 사용시, 압박으로 인한 부작용이 발생 할 수 있으므로 주의.
3. 습기가 없고 건조한 곳에 보관.
4. 일회용 제품으로 한번 사용 후 폐기.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)