

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신16-3484호
- 품목명: 팽창성부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

팔 또는 다리 주위에 위치하여 사지를 움직이지 않도록 팽창되는 기기

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관


■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 제품 사용 전 패키지나 제품에 손상이 있는지 확인 한 후 사용하도록 합니다.
- (2) 환자의 체형에 맞추어 제품 사이즈를 준비 합니다,

2) 사용 방법

- (1) 슬라이드 부목(a)을 사용하여 Pelvic Sling을 환자 골반 아래로 밀어 넣습니다.
- (2) 환자를 제자리에 고정하고,(그림 1) "inside"라고 표시된 면이 위로 오게 합니다. 그런 다음 슬라이드 부목(a)을 제거하십시오.
- (3) Pelvic Sling은 골반의 위치를 변경하지 않고 환자의 신체에 단단히 장착해야 합니다. 벨트 착용과 유사하게 고정 테이프를 버클에 밀어 넣고 살짝 당깁니다.(그림 3)
- (4) 핸드펌프(hand inflator(e))를 Pelvic Sling에 연결합니다.(그림 4)
- (5) 핸드펌프(hand inflator(e))를 사용하여 Pelvic Sling을 압력계의 녹색 영역 시작부분까지 팽창시킵니다.(그림 4)
 - * 압력이 증가하면 골반 내 부피가 더 크게 감소할 수 있습니다. 필요한 압력 증가는 사용자의 재량에 달려 있지만 압력계의 녹색 영역을 초과해서는 안 됩니다.(c)
 - * 이송 시에는 커프(b)가 적절히 팽창되었는지 확인하고, 압력계(c)의 압력도 점검하도록 합니다.
- (6) 핸드펌프(hand inflator(e))를 한 후에 stop-cock(d)을 닫습니다.
- (7) 필요한 경우 슬라이드 부목(a)을 사용하여 무릎을 고정합니다.(그림 5)
 - *주의: X-ray, CT 및 MRI 촬영 시, 반드시 핸드펌프(e)를 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 핸드 펌프 주변 부위에 음영을 주게 되어 정확한 데이터를 측정하지못할 수 있습니다.
- (8) 핸드 펌프 제거하는 방법
 1. stop-cock(d)을 "ZU - CLOSED" 위치로 돌립니다.(그림 5)
 2. 핸드 펌프(e)를 탈거하십시오.(그림 5의 2번)

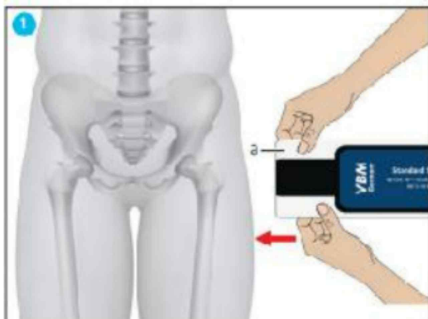



3) 사용 후 관리 및 보관 방법

- (1) 본 제품은 일회용 제품으로 재사용하지 않고 반드시 폐기하도록 합니다,
- (2) 직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관합니다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 압박시 과도하게 압박이 가해지지 않도록 한다.
적정 압력 : 70-100 mmHg
- 2) 사용부위에 상처가 있을 경우 직접 접촉하지 않는다.
- 3) 본 제품은 골반고정부목으로 의도된 용도 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
- 4) 보관시 직사광선을 피한다.
- 5) 일회용제품으로 재사용하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)