

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신20-1645호
- 품목명: 수동식환자운반기

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자를 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

■ 보관 또는 저장방법

습기를 피하고 서늘한 곳에 건조

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 제품의 상태에 이상이 있는지 확인한다.
- (2) 제품의 연결 상태 (후크, 길이조절 레버 등) 상태를 확인한다.
- (3) 제품에 이상이 있을 경우 사용하지 않는다.

2) 조작 방법

- (1) 환자를 바닥에 반듯이 눕히고, 환자의 신체 사이즈에 따라 들것의 길이를 조절한다.
- (2) 제품 위 아래 부분에 위치한 분리 후크를 열어 들 것을 왼쪽과 오른쪽으로 분리한 후, 환자의 밑으로 들것을 끼워 넣어 위치시킨다.



<분리 후크>



< 들 것 양 쪽 으로 분리된 모습>

- (3) 분리후크를 연결하고 고정벨트를 이용하여 환자를 고정 시킨다.
- (4) 이송은 반드시 2인 이상이어야 하며, 추가 인원이 필요할 수 있다.

3) 사용 후 관리 및 보관 방법

- (1) 사용 후 오염은 부드러운 헝겊으로 닦아 청결하게 유지 한다.

(2) 세로 방향으로 반으로 접어 보관한다.



<접힌 상태>

(3) 보관은 습기를 피하고 서늘한 곳에 건조 시킨다.

■ 사용시 주의사항

1. 본 제품을 환자 운반용 이외의 용도로 사용하지 않는다.
2. 제품의 잠금, 해제 후크장치가 제대로 작동하는지 확인한다.
3. 제품을 함부로 분해, 개조하지 않는다.
4. 카본 소재 특성상 높은 습도의 환경에서도 사용이 가능하나, 반드시 사용 가능 온도(-40°C~180°C)를 확인 하도록 한다
5. 카본 소재 특성상 카본은 탄소섬유(Carbon fiber)로 금속이 아니므로, 환자를 들 것에 올린 상태에서 X-ray, CT, MRI 촬영이 가능하므로 일반형 들 것과 구분해서 사용하도록 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)