

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신21-1380호
- 품목명: 수동식환자운반기

작성연월 : 2025년 01월 03일

## ■ 사용목적

환자를 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

## ■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관

## ■ 사용방법

### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용자는 사용 전 외관상 파손이나 손상된 부위 특히 손잡이 부위 손상 없는지 꼼꼼히 살피도록 한다.

### 나. 사용 방법

- 1) 추가 손상이 의심되는 환자에 무리가 가지 않도록 환자 등부분으로 매트를 넣어 조심스럽게 매트 위로 옮긴다.
- 2) 위, 아래 2개의 원터치 방식의 환자고정벨트를 환자에 맞춰 고정시킨다.
- 3) 환자 이송 시에는 앞, 뒤로 두 사람이 양 쪽 사이트에 있는 손잡이의 균형을 맞춰 들도록 한다.

### 다. 사용 후 관리 및 보관 방법

사용 후, 환자로부터 감염위험을 예방하기 위해 중성세제로 세척하고, 마른 수건으로 닦은 후 자연 상태에서 건조시킨다.

## ■ 사용시 주의사항

1. 환자를 고정대 위에 옮긴 후 반듯하게 눕힌다.
2. 환자의 허용중량은 160kg 이하이므로 이를 고려하도록 한다.
3. 환자 이송 전 환자고정벨트가 제대로 채워졌는지 확인 후 이송하도록 한다.
4. 환자 이송 시에는 반드시 앞, 뒤로 2명이 균형을 맞추어 이송하도록 한다.

## ■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)