

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-1137호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2023년 08월 18일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)를 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 제품에 파손된 부분이 없는지 확인한다.
- 2) 사용할 부위에 맞는 사이즈 제품을 선택한다.

나. 사용 방법

- 1) 제품의 안쪽 면이 위를 향하도록 하고 고정시킬 부위 뒤에 위치시킨다.
- 2) 상부 및 하부에 위치한 벨크로 테이프를 조절하여 적절하게 고정 시킬 부위를 정한다.
- 3) 중간 부분에 남은 벨크로 테이프를 조절하여 고정 시킬 부위에 완전히 밀착시킨다.
- 4) 사용 후 벨크로 테이프를 모두 오픈하여 제품과 신체를 분리한다.

다. 사용 후 관리 및 보관 방법

- 1) 사용 후 오염이 있는 경우, 폴리에틸렌 타포린 코팅 재질로 혈액이나 이물질의 세척이 용이함으로 물기 있는 부드러운 천으로 닦아낸 후 건조하게 한다.
- 2) 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 제품이 화기에 닿지 않도록 주의하여 보관한다.

■ 사용시 주의사항

1. 본 제품은 의료기기로서 의사의 지시에 따라 사용한다
2. 본 제품은 피부에 닿아서는 안 되며, 반드시 의복 위에 착용하여야 한다.
3. 사용 전 제품의 이상 유무를 확인하고 제품의 이상이 있으면 즉시 사용을 멈추고 교체한다.
4. 제품을 사용하기 전 제품에 혈액이나 다른 오염물질이 묻어있나 확인하고 물티슈나 헹굼 등으로 가볍게 닦아준다.
5. 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용하지 않는다.
6. 장기간 사용하는 경우 환자의 피부를 모니터링해야한다.
7. 심하게 압박되어 불편을 느낄 경우 고정 스트랩을 느슨하게 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)