

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-1844호
- 품목명: 경성후두경

작성연월 : 2023년 04월 27일

■ 사용목적

후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

■ 보관 또는 저장방법

실온보관

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 사용방법을 숙지한다.
- 2) 사용 전 본체 및 구성품이 누락되거나 파손된 부분은 없는지 확인한다.
- 3) 환자의 체형, 사이즈에 맞는 블레이드를 선택한다.

나. 조작방법

- 1) 건전지 투입구에 건전지 2개를 본체에 삽입하고 결합한다.
- 2) 환자의 사이즈에 맞는 블레이드를 선택하고, 블레이드를 손잡이 상단의 연결부에 장착한다.
- 3) 블레이드의 조명을 통해 후두를 관찰한다.

다. 사용 후 관리 및 보관 방법

- 1) 세척 및 멸균방법
 - (1) 사용 후, 블레이드를 깨끗한 물에 헹궈 잔여물을 제거한다.
 - (2) 부드러운 천으로 제품을 닦아낸 후 실온에서 건조한다.
 - (3) 완전히 건조된 기구를 고압증기 멸균(134°C, 3~4분간) 후 보관한다.
- 2) 장시간 사용하지 않을 때는 건전지를 본체에서 분리하여 보관한다.

■ 사용시 주의사항

1. 제품이 녹이 슬거나 파손된 부분이 있는지 확인한다.
2. 본 제품을 본래의 사용목적 이외의 다른 용도로 사용하면 안된다.
3. 사용 전에는 반드시 세척 및 멸균한 이후에 사용한다.
4. 올바른 사용을 위해 교육을 받은 전문가가 사용하여야 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)