

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신23-1495호
- 품목명: 수동식환자운반기

작성연월 : 2023년 06월 19일

■ 사용목적

환자를 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

■ 보관 또는 저장방법

고온 다습 및 직사광선은 피해 보관

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용하기 전 제품 손상여부를 면밀하게 확인한다.
- 2) 제품 하중 및 용도를 확인한다.

나. 조작방법

- 1) 환자를 운반기 정중앙에 반듯하게 눕힌다.
- 2) 환자고정끈을 사용하여 환자를 견고하게 고정시킨다.
- 3) 구조자가 2인 1조로 수평을 유지한 상태로 환자를 이송한다.

다. 사용 후 관리 및 보관 방법

- 1) 세척방법
사용한 후에는 본체와 벨트를 분리하여 중성세제로 세척한 후 서늘한 그늘에서 건조한다.
- 2) 보관방법
고온 다습 및 직사광선은 피해 보관 하도록 한다.
- 3) 관리방법
벨트는 건조를 마친 본체에 환자고정용 벨트 홈에 끼워 세워 놓고, 다음 사용에 지장이 없도록 구급차, 구조 차량 등에 보관한다

■ 사용시 주의사항

1. 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
2. 들 것에 환자를 눕힐 시, 정중앙에 똑바로 눕힌 후 반드시 환자고정 벨트로 단단히 고정시키도록 하며, 그렇지 않으면 환자 이송 시, 추락의 원인이 될 수 있다.
3. 환자 이송 시 수평 균형을 유지하여, 환자의 쓸림 및 추락현상을 방지하도록 한다.
4. 하중은 허용 기준치를 초과하지 않도록 유의한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)