

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신23-873호
- 품목명: 팽창성부목

작성연월 : 2023년 04월 04일

## ■ 사용목적

팔 또는 다리 주위에 위치하여 사지를 움직이지 않도록 팽창되는 기기

## ■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관

## ■ 사용방법

### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 제품에 파손된 부분이 있는지 확인한다.
- 2) 공기 펌프가 잘 동작 하는지 확인한다.
- 3) 사용할 부위에 맞는 사이즈 제품을 선택한다.

### 나. 사용 방법

- 1) 제품의 지퍼를 열어 고정시킬 부위를 제품으로 감싼다.
- 2) 공기주입구/배출구에 공기 펌프를 사용하여 공기를 주입시켜 팽팽하게 하여 고정시킬 부위에 완전히 밀착시킨다.
- 3) 사용 후 지퍼를 열고, 공기를 빼내어 제품과 신체를 분리하여 보관 가방에 보관한다.

### 다. 사용 후 관리 및 보관 방법

- 1) 사용 후 오염이 있는 경우, 물기 있는 부드러운 천으로 닦아낸 후 건조하게 한다.
- 2) 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 제품이 화기에 닿지 않도록 주의하여 보관한다.
- 4) 혈액 및 체액으로 교차오염이 발생할 경우 폐기절차에 따라 폐기한다.

## ■ 사용시 주의사항

1. 본 제품은 의료기기로서 의사의 지시에 따라 사용한다.
2. 사용 전 제품의 이상 유무를 확인하고 제품의 이상이 있으면 즉시 사용을 멈추고 교체한다.
3. 제품을 사용하기 전 제품에 다른 오염물질이 묻어있나 확인하고 물티슈나 헹굼 등으로 가볍게 닦아 준다.
4. 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용하지 않는다.
5. 장기간 사용하는 경우 환자의 피부를 모니터링 해야한다.

## ■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)