

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신23-952호
- 품목명: 재사용가능의료용검자

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

진료시 조직을 잡거나 조작, 압박 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 검자로서 재사용이 가능하다.

■ 보관 또는 저장방법

실온보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

(1) 본 제품을 사용하기 전에 손상여부와 세척 및 멸균여부 등을 면밀하게 확인한다.

2) 조작방법

- (1) 제품의 손잡이를 엄지와 검지로 잡는다.
- (2) 절단하고자 하는 부위에 작용부를 위치시킨다.
- (3) 손잡이를 조작하여 조직을 잡거나 조작 압박한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

(1) 세척방법

제품 사용 후, 최대한 빨리 제품을 깨끗한 물로 세척한다.

(2) 멸균방법

멸균방법	습열멸균
멸균온도	143℃
멸균시간	1~4분
멸균압력(해당하는 경우)	해당없음

(3) 보관방법

부드러운 천으로 닦아낸 후 실온에 보관한다.

(4) 관리방법

해당없음

■ 사용시 주의사항

1. 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
2. 본 제품을 본래의 사용목적 이외의 다른 용도로 사용하면 안된다.
3. 제품이 녹이 슬거나 파손된 부분이 있는지 확인한다.
4. 사용 전에는 반드시 세척 및 멸균한 이후에 사용한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)