

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신24-1499호
- 품목명: 흡인용튜브·카테터

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브·카테터

■ 보관 또는 저장방법

어둡고, 서늘하고 건조한 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 주의사항

- (1) 제품의 유효기간을 확인하고 사용한다.
- (2) 포장 및 제품의 손상, 파손이 있는지 확인하고 포장이 손상된 경우 제품 사용이 금지된다.
- (3) 사용설명서를 숙지하고 사용하도록 한다.
- (4) 숙련된 전문가의 판단에 따라 적절한 크기의 제품을 선택하여 사용한다.

2) 조작방법

- (1) 환자에게 적합한 사이즈를 선택한다.
- (2) 포장을 제거하고 제품을 꺼낸다.
- (3) 제품의 커넥터 부분을 별도의 흡인 장비와 연결한다.
- (4) 흡인 장비를 작동 시킨 후, 폐색되지 않도록 주의하면서 흡인을 실시한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 본 제품은 어둡고, 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.
- (2) 보관 시 자외선, 햇빛 및 형광등에 장기간 노출되지 않도록 한다.
- (3) 본 제품은 일회용 의료기기 이므로 재사용을 금하고 사용 후 반드시 폐기한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 일회용 의료기기 이므로 재사용 하지 않는다. 재사용 또는 재멸균은 장치의 구조적 무결성을 손상 시킬 수 있으며 또는 장치 고장으로 이어질 수 있고, 이로 인해 환자가 부상, 질병 또는 사망할 수 있다. 재사용, 재살균 등은 또한 기기 오염의 위험을 초래할 수 있으며, 한 환자에서 다른 환자로 전염되는 것을 포함하지만 이에 제한되지 않는 환자 감염 또는 교차 감염을 유발할 수 있다. 기기 오염은 환자의 부상, 질병 또는 사망으로 이어질 수 있다.
- 2) 사용목적 외 제품 사용을 금지한다.
- 3) 포장이 열리거나 손상된 경우에는 사용하면 안 된다.
- 4) 반드시 숙련된 전문가가 조작하여 환자에게 사용해야 한다.
- 5) 저산소증을 예방하기 위해서는 각 흡입 시간은 15초 미만으로 하도록 한다.
- 6) 라텍스 알러지가 있는 경우 주의하여 사용하도록 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)