

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신24-1838호
- 품목명: 진공성형부목

작성연월 : 2024년 09월 30일

## ■ 사용목적

상처입은 신체 부분을 고정하기 위해서 사용하는 기구로서 상처 부위의 주변에 설치한 후 공기를 빼서 고정한다.

## ■ 보관 또는 저장방법

어둡고, 서늘하고 건조한 곳에 보관

## ■ 사용방법

### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 포장 및 제품의 손상, 파손이 있는지 확인하고 포장이 손상된 경우 제품 사용을 금지하도록 한다.
- 2) 진공펌프가 정상적으로 작동하는지 확인한다.
- 3) 사용설명서를 숙지하고 사용하도록 한다.
- 4) 숙련된 전문가의 판단에 따라 적절한 크기의 제품을 선택하여 사용한다.

### 나. 조작방법

#### 착용 시

- 1) 부상당한 환자의 위치에 따라 적절한 크기의 진공 매트를 놓고 수동 진공 펌프를 준비한다.
- 2) 진공 매트가 부상 부위를 고르게 덮이도록 한다. (내부의 폴리스티렌 비즈가 고르게 퍼져 있는지 확인하고 한쪽에 뭉치거나 찌그러지지 않도록 주의한다.)
- 3) 부상당한 부위 위에 착용한 진공 매트를 약간 조이는 정도로 벨크로 스트랩을 감는다. (2차 부상을 방지하기 위해 너무 조이지 않도록 주의한다.)
- 4) 수동 펌프의 5-in-1 밸브와 진공 매트와 밸브를 연결하고 "펌프"를 시작한다. (이렇게 하면 공기가 빠져나가고 진공 매트가 신체 윤곽에 따라 부상 부위를 감쌀 수 있다). 완료되면 진공 폼이 제대로 고정되어 있는지, 너무 느슨하다면 수동 펌프를 사용하여 더 많은 공기를 빼내도록 한다. 너무 타이트하면 안전 값(공기 누출 방지)을 약간 짜서 진공 매트와 공기를 약간 방출한다.
- 5) X-ray 촬영이 필요한 경우 부목을 착용한 상태에서 촬영이 가능하다.

#### 제거 시

- 1) 진공 매트와 흰색 안전 밸브를 열고 손가락으로 압박하면서 진공 형태를 해제한다.
- 2) 벨크로 스트랩을 조심스럽게 풀고 진공 매트를 제거한다.

### 다. 사용 후 관리 및 보관 방법

- 1) 제품이 오염되었다면 물이나 일반 가정용 혹은 병원용 세제를 묻힌 천으로 깨끗하게 세척하고 청결하게 건조시킨다.
- 2) 본 제품은 어둡고, 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.
- 3) 보관 시 자외선, 햇빛 및 형광등에 장기간 노출되지 않도록 한다.

■ 사용시 주의사항

1. 제품의 올바른 사용방법을 위해 사용법을 숙지한 사람이 사용하도록 한다.
2. 날카로운 물체와 제품이 접촉하지 않도록 주의한다.
3. 제품 사용 전 부목의 펌프와 부목이 제대로 작동하는지 사용 전 확인해야 한다.
4. 장치의 본래의 용도 이외에는 사용하지 않는다.
5. 제품의 상태를 주기적으로 점검하도록 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)