

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신24-1930호
- 품목명: 구강개구기

작성연월 : 2025년 01월 03일

## ■ 사용목적

구강을 관찰 등 하기 위하여 벌어주는 기구

## ■ 보관 또는 저장방법

제품은 습하거나 햇빛이 강하지 않은 곳에 보관

## ■ 사용방법

### 1) 사용 전 주의사항

- (1) 제품의 소독, 청결 상태를 반드시 확인한다.
- (2) 제품의 사용설명서를 숙지하고 사용하도록 한다.
- (3) 숙련된 전문가의 판단에 따라 제품의 사용 용도에 맞게 사용한다.
- (4) 제품은 습하거나 햇빛이 강하지 않은 곳에 보관한다.

### 2) 조작방법

- (1) 제품을 사용전 굳게 닫힌 환자의 입을 맨손으로 최대한 벌려 본다.
- (2) 보조자, 혹은 다른 손으로 환자의 입술을 벌린다.
- (3) 제품의 스크류 부분이 조금이라도 삽입 되었다면 손잡이를 잡고 오른쪽(시계 방향)으로 천천히 돌린다.
- (4) 이때, 보조자나, 다른손으로 환자의 머리, 구강 부위를 최대한 고정 시킨다.
- (5) 환자의 구강이 개구 되면 제품을 왼쪽으로(반시계 방향)돌리면서 조심히 제품을 빼낸다.

### 3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않고 폐기한다. (재사용 금지)

## ■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품을 사용 목적 이외의 용도로 사용하지 않는다
- 2) 전문 의료 교육을 받은자의 지침에 따라 본 제품을 사용한다.
- 3) 의식이 없거나, 구강이 굳게 닫혀 구강의 개구가 필요시 사용한다.
- 4) 환자를 주의 깊게 관찰하며 사용한다.

## ■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)