

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신24-55호
- 품목명: 흡인용튜브.카테터

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브.카테터

■ 보관 또는 저장방법

직사광선, 습기가 없는 곳에 보관.

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품이 손상된 곳이 없는지 확인한다.
- 2) 본 제품은 자격 있는 의사의 지시에 따라서 사용해야 한다. 의사의 지시에 따라 기도 유지 또는 호흡기 장애와 관련된 폐쇄를 없애기 위해 상기도에서 분비물을 제거한다.

나. 조작방법

- 1) 포장을 벗기고 튜브를 꺼낸다.
- 2) 커넥터 한쪽을 흡인 기계에 연결하고 반대쪽을 카테터에 연결한다.
- 3) 카테터를 사용하여 액상 또는 반고체의 물질을 흡인한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 단일 환자에게 사용하는 제품으로, 사용한 제품을 다른 환자에게 재사용 하지 않는다.
- 2) 제품은 사용 후 폐기 절차에 따라 폐기한다.
- 3) 세척 및 소독
 - (1) 기기에 연결된 튜브를 분리한다.
 - (2) 튜브를 따뜻한 수돗물로 내부까지 철저히 헹군다.
 - (3) 그런 다음 식초 1부(>=5% 아세트산 농도)와 물 3부(55°C-65°C / 131°F-149°F)를 섞은 용액에 60 분간 담가둔다. 깨끗하고 따뜻한 물로 헹구고 자연 건조시킨다.
 - (4) 깨끗하고 젖은 천으로 닦아 외부 표면을 깨끗하게 유지한다.
 - (5) 튜브를 검사하고 튜브나 끝부분(커넥터)에 균열이나 손상이 있으면 새 제품으로 교체한다.

■ 사용시 주의사항

1. 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
2. 사용 전 제품의 이상 유무를 육안으로 확인한다.
3. 사용자는 기기 조작 전 적절하게 교육을 받아야 하며, 제품의 사용방법을 숙지해야 한다.
4. 본 제품은 단일 환자에게 사용하는 것으로, 사용된 제품을 다른 환자에게 사용하지 않는다.
5. 사용할 카테터는 목 졸림/질식을 방지하기 위해 조심스럽게 삽입해야 한다.
6. 어린이가 튜브를 가지고 놀지 못하게 한다. 목이 졸릴 수도 있다.
7. 장치 사용으로 인해 알레르기 반응이 있는 경우 의사와 상담한다.
8. 사용이 완료된 제품은 의료기관의 절차에 따라 폐기한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)