

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수인22-4025호
- 품목명: 단기 사용 기관·기관지용 튜브·카테터

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

단기적 사용을 목적으로 기도를 확보하기 위하여 비강을 통하여 삽입하는 튜브카테터

■ 보관 또는 저장방법

Blister Pack 으로 포장된 밀봉의 상태로, 직사광선을 피하여 상온의 깨끗하고 건조한 곳에서 보관한다. (49°C이상의 온도에는 노출시키지 않는다.)

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 기도의 정확한 크기는 환자의 코끝에서부터 귀의 아래쪽 (턱의 각도)까지 측정하여 선택해야하며 직경은 환자의 콧 구멍보다 약간 작은 제품을 선택해야한다.
- 2) 환자와 시술자를 위한 기본적인 예방조치 (눈 보호, 마스크, 장갑 등)을 한다.
- 3) 코에 장애물이나 골절이 있는지 확인한다.

나. 사용방법

- 1) 제품의 포장을 개봉하고, 제품의 삽입이 원활하도록 제품 끝에 수용설 젤을 발라주고, 이때 팁(내부)가 막히지 않도록 주의한다. (*수용성윤활제: 병원에서 사용되는 일반제품으로 본 제품의 구성품이 아님)
- 2) 시술하고자 하는 한쪽의 비공을 선택하여, 경사 팁을 비강 중격쪽으로 향하게 하여 기도를 확보할 수 있도록 삽입하여 위치시킨다.
- 3) 삽입을 할때 저항이 느껴지는 경우, 기도에서 본 제품을 제거하여 반대편 비공에 삽입한다.
- 4) 플랜지(튜브의 끝에 연결된 커넥터부분)이 코 바깥쪽(콧구멍)에 닿을 때까지 삽입하여 제품을 위치시킨다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 1) 일회용 의료기기이므로 사용 후, 지정된 수거용기에 폐기한다.

■ 사용시주의사항

가. 사용시 주의사항

- 1) 제품을 사용하기 전에 적절한 크기를 선택한다.
- 2) 무균유지를 확인할 수 있도록, 포장이 개봉되어 있거나 손상되지 않은지 확인하여 사용한다.
- 3) 제품을 사용하기 전에 매뉴얼을 확인하여 사용하여, 심각한 또는 치명적인 질병 또는 부상을 초래할 수 있는 부적절한 사용을 방지하도록 한다.
- 4) 유효기간이후의 제품은 사용하지 않도록 한다.
- 5) 본 제품은 일회용제품이므로 제품을 재사용하지 않도록 한다. 재사용 할 경우 환자에게 위험할 수 있다.

나. 금기

- 1) 다음 사항에 해당될 경우, 제품을 사용하지 않도록 한다.
 - 비강 감염
 - 코의 기형
 - 비정상적인 항응고제
 - 심각한 머리부상이나 얼굴 부상을 입은 환자 또는 NPA(해당 튜브)가 뇌 조직으로 의도하지 않게 침투할 수 있기 때문에 두개골골절이 의심될 경우에 사용불가

다. 부작용

- 1) 식도로 삽입될 시, 환자의 구토를 유발할 수 있으므로 이를 주의하여 기도로 삽입한다.
- 2) 과한 삽입으로 코에 출혈이 나지 않도록 주의한다.
- 3) 튜브가 구부러지거나 막히지 않게 주의한다.
- 4) 지나치게 긴 튜브는 식도를 지날 수 있으며 이 경우, 폐포저환기 증후군이나 위의 팽창을 유발할 수 있으므로 주의한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)