

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신11-1634호
- 품목명: 갑상선방사선방어용기구

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

갑상선에 노출되는 방사선을 방어하기 위한 기구

■ 보관 또는 저장방법

건조한 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용전 준비사항

청결한 상태를 유지한다.

2) 사용방법

(1) 늘어진 부분이 전면에 오도록 경부에 장착할 것.

(2) 칼라 부분 양 끝에 붙어 있는 매직 테이프를 후면에서 고정시킴

3) 사용 후의 보관 및 관리방법

건조한 곳에 보관한다.

■ 사용시 주의사항

1) 사용상 주의

중요한 기본적 주의사항

- ① 관전압 150 kV 이하의 X선으로 의료를 행할 경우에 산란선(미X선)으로부터의 피폭량을 저감시키는 것을 목적으로 하며 1차방사선(직접선)등의 방사선피폭의 보호에는 사용하지 말 것.
- ② X선방호재료에 손상 또는 그러한 우려가 있을 경우에는 사용하지 말 것.
- ③ 꺾거나 구부리는 등의 상태가 반복되면, X선방호재료의 차단효과를 떨어뜨리는 원인이 될 수 있으므로 주의할 것.
- ④ 본 제품의 착용시에는 의자에 앉은 자세로의 작업을 피할 것.
- ⑤ 외관에 흠집이나 변형 등이 발견된 경우는 사용하지 말 것.

그 외 주의사항

- ① 폐기할 경우에는, 반드시 지방자치단체의 조례 및 규칙에 따라 허가받은 산업폐기물처리업자에 의뢰할 것.
- ② 오염된 경우에는 물, 또는 중성세제를 부드러운 헝겊에 묻혀 닦아낸다.
- ③ 소독은 소독용 알코올로 마른걸레질을 할 것. 가스멸균, 증기멸균, 끓임, 크레졸 등은 변질이나 조기 열화의 우려가 있으므로 사용하지 말 것.

2) 보관방법

- ① 전용 행거(옷걸이)에 걸어 놓거나 하여 보관할 것.

② 직사일광이 비치는 장소나 난방기구 등 고온환경에서의 보관은 하지 말 것.

3) 사용기한 및 보수/점검에 관한 사항

사용 기한

X선방호재료에 손상을 입을 때 까지를 기한으로 한다.

보수/점검에 관한 사항

- ① 일상적으로 일을 시작하고 마칠 때, 눈으로 살펴보거나 만져보는 등에 따른 검사를 반드시 행할 것.
- ② 반 년에 1회 이상, X선 투시 또는 투과사진촬영에 따른 검사를 행할 것. 제조 후 3년 이상 경과한 제품은 검사 빈도를 높일 것.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)