

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신12-1239호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피해 실온에 보관

■ 사용방법

1) 사용전 준비사항

- (1) 포장지의 파손여부를 확인
- (2) 제품의 형질여부 파악

2) 사용방법

- (1) 환자의 머리 및 목 부분을 중립시키는데 다른 부작용이 없다면 환자의 머리 및 목 부분을 중립으로 정렬을 시킨다.
- (2) 환자에 맞는 제품을 선택한다.
 - 성인용(ET-002) : 턱 받침 조절용 구멍 4개 있음
 - 소아용(ET-002B) : 턱 받침 조절용 구멍 3개 있음
- (3) 환자의 턱 부분에 맞추어 제품의 양쪽 턱 받침 조절용 구멍을 선택한 후 조절용 구멍 옆에 있는 턱 받침 고정용 탭을 눌러서 고정을 시킨다.
- (4) 제품 양쪽 끝을 잡고 환자 목 둘레에 맞춰서 둥글게 말아 준다.
- (5) 제품의 턱받침과 함께 환자 목 부분에 감싸준 후 고정용 기구로 제품을 고정시켜 준다.
- (6) 누워 있는 환자의 경우 제품을 우선 환자의 목 뒤 부분으로 넣어준 뒤 턱받침으로 환자의 턱 부분에 위치시킨 후 제품을 고정시켜 준다.

3) 사용 후의 보관 및 관리방법

재사용이 가능한 비멸균 제품으로 사용후 제품이 접혀 있는 상태로 보관하지 않고 사용전 준비 상태인 평평한 상태로 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 반드시 의료인 또는 본 제품을 사용할 수 있는 교육을 받은 자에 의해서만 사용되어야 한다.
- 2) 환자의 경추 부분의 움직임을 방지하기 위해 환자의 머리 및 목 부분이 적절히 움직이지 않게 하는 것이 중요하다.
- 3) 환자가 제품을 사용하고 있는 중에 제품을 임의로 조절하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)