

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신14-1607호
- 품목명: 체외형의료용전극

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

일반적인 인체 신호를 감지하거나 인체에 자극을 주기 위한 체외형 기기. 별도로 분류된 전극은 여기에서 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

15°C~35°C 의 건냉한 곳에서 보관

■ 사용방법

- 1) 포장을 벗겨낸다.



- 2) 뒤쪽편 패드(back pad)를 꺼내서 환자몸에 부착하고,



- 3) 앞쪽 패드(front pad)를 꺼내서 환자몸에 부착한다.



<세척 및 멸균>

1회용 제품으로 멸균 및 멸균처리 가능하지 않다. 오토클레이브나 가스소독하지 말고 유액에 담가서는 안되며, 알코올 또는 용해제로 전극패치를 세척해서는 안된다.

■ 사용시 주의사항

1) 사용상 주의사항

- (1) 사용 전 전극사용방법을 숙지할 것.
- (2) 구기거나 접지 말고 무거운 물건 아래 두지 말 것.
- (3) 부착시에는 적어도 전극 패취 간의 간격이 1인치가 되도록 할 것.
- (4) 흉골이나 척추 같이 뼈 돌출부위에는 겹치게 하지 말 것.

2) 사용 후 보관 및 관리방법

일회용으로 재사용, 재멸균하지 않으며 개봉한 제품은 사용하지 않았더라도 폐기한다.

3) 유효기간 : 제조일로부터 12개월

4) 보관조건 혹은 저장방법 : 15°C~35°C의 건냉한 곳에서 보관할 것.

5) 포장단위 : 1Pair/Pack

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)