

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신15-143호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하여 실온에 보관

■ 사용방법

1) 환자평가하기

- 현지 프로토콜에서 금지되지 않는 한 머리를 중립 위치 또는 “시선이 전방을 향하는” 위치로 맞춘다.

2) 환자에 맞게 보호대 크기 맞추기

- Select : 4가지 성인용 위치 중에서 선택할 수 있다.
- Pedi-Select: 3가지 소아용 위치 중에서 선택할 수 있다.

3) 조절식 보호대 조정 및 고정하기

- 2단계에서 선택한 크기에 맞게 턱 지지대를 조정한다.
- 양쪽 보호대를 조정할 때 동일한 방법을 사용한다.
- 두 개의 잠금 탭을 눌러 양쪽을 고정시킨다.

4) 보호대를 미리 성형하기

5) 수동으로 머리의 중립 위치를 유지하면서 보호대 감기

- 턱 아래쪽에 턱 지지대를 놓는다.
- 다른 크기가 필요한 경우 보호대를 분리하여 크기를 조정한 후 다시 감는다.
- 앞쪽을 제자리에 고정시킨 상태에서 보호대가 꼭 맞도록 당겨서 고정한다.
- 누워 있는 환자의 경우 턱 지지대를 받치기 전에 목뒤로 후면 패널을 밀어 넣는다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 척추 부상이 의심되는 경우, 전체 고정 기구 중 적합한 목 고정 기구가 포함 되어야 한다.
- 2) 척추가 움직이지 않도록 반드시 환자를 적절히 고정해야 한다.
- 3) Stifneck Select 보호대는 숙련된 자격을 갖춘 의료 관리 공급자만이 사용할 수 있다.
- 4) 잘못사용하면 부상 또는 영구 장애를 초래할 수 있으니 항상 현지 척수 고정 프로토콜을 따라야한다.
- 5) 올바른 크기의 보호대를 사용해야한다. 너무 큰 보호대를 사용하면 환자의 경추가 과도하게 확장될 수 있고, 환자보다 작은 크기의 보호대는 적절한 안정성을 제공하지 못할 수 있다.
- 6) Select 또는 Pedi-Select 보호대를 환자에게 부착한 상태로 조정할 수 없다.
- 7) 본 제품은 일회용으로 제작되었다. 제품을 재사용할 경우 교차 오염, 성능 저하 및 또는 기기 오작동의 위험이 높아질 수 있다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)