

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신15-1490호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선, 습기가 없는 곳에 보관. 평평하게 펴진 상태로 보관하여 제품이 휘지 않게 한다.

■ 사용방법

- 1) 환자의 머리 및 목 부분을 중립시키는데 다른 부작용이 없다면 환자의 머리 및 목부분을 중립으로 정렬 시킨다.
- 2) 환자에 맞는 제품을 선택한다.(성인용 / 소아용)
- 3) 환자의 턱 부분에 맞추어 턱받침과 함께 환자 목 둘레에 맞춰서 둥글게 말아준다.
- 4) 제품을 환자 목 부분에 감싸준 후 제품을 고정시킨다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 반드시 의료인 또는 본 제품을 사용 할 수 있는 교육을 받은 자에 의해서만 사용되어야 한다.
- 2) 환자의 경추 부분의 움직임을 방지하기 위해 환자의 머리 및 목 부분이 적절히 움직이지 않게 하는 것이 중요하다.
- 3) 환자가 제품을 사용하고 있는 중에 제품을 임의로 조절하지 않도록 한다.
- 4) 평평하게 펴진 상태로 보관하여 제품이 휘지 않게 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)