

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신15-1491호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선, 습기가 없는 곳에 보관

■ 사용방법

- 1) 척추 손상이 의심되는 환자를 들것에 눕힌다.
- 2) 되도록 환자에게 변위를 가하지 않고, Head Immobilizer를 환자의 머리에 맞게 끼운다
- 3) 헤드 블록에 환자의 머리가 반듯이 고정 되어 있는지 재확인 한다.
- 4) 머리 끈과 턱 끈을 조이고 들것에 고정시킨다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 최대한 환자의 움직임이 없도록 주의한다.
- 2) 목부분이 바르지 않은 환자의 경우 그상태 그대로 고정하도록 한다.
- 3) 직사광선, 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)