

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신15-278호
- 품목명: 의료기구용클립

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적


인체조직을 제외한 의료기기 등을 일시적으로 고정하거나 잡아주기 위해 사용하는 기구

■ 보관 또는 저장방법

보관온도 -34°C ~ +52°C

■ 사용방법

- 1) 마우스피스 구멍이 환자의 발쪽을 향하도록 확실히 하고 튜브를 V-wedge 쪽으로 민다.
- 2) 바이트블럭을 환자 입 쪽으로 위치하도록 하고 입술이 이와 바이트 블록 사이에 걸리지 않도록 한다.
- 3) 환자 목 밑으로 슬라이드 스틱을 두르고 반대편의 고정용 구멍에 끼워 통과해 고정시킨다.
- 4) 슬라이드 스틱을 제거하고 스트랩을 조여 단단히 고정시킨다.
- 5) 나사형 조임 튜브홀더를 조절하여 튜브를 고정시킨다.

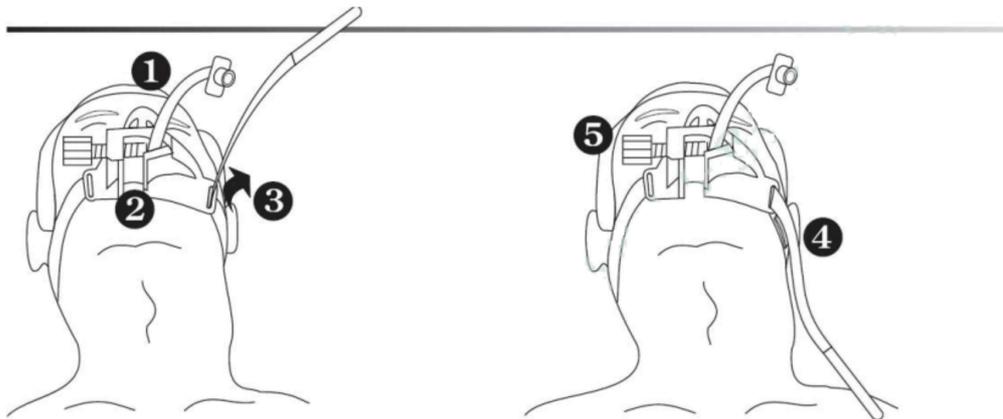

■ 사용시 주의사항

- 1) 이 장비는 지역 응급의료센터, 구급대, 병원 등에서 사용자격이 있는 사람에 의해서만 사용되어야 합니다.
- 2) 1회용으로만 사용합니다. 재사용은 교차감염의 원인이 됩니다.
- 3) 단기간 인튜베이션에만 사용합니다. 최대 사용시간이 24시간을 넘지 않도록 합니다
- 4) 이 장비가 사용되어지는 환자는 지속적으로 모니터링 되어야 합니다.
- 5) 이 장비는 사용에 앞서 적격자에 의해 기능적으로 이상 없음이 체크되어야 합니다.
 - 제품의 모든 부품을 검사하고 하나의 부품이라도 훼손되어 있으면 사용을 금합니다.

*보관 온도: -34°C에서 +52°C

*작동 온도: -18°C에서 +43°C6)

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)