

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신15-1065호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하여 실온에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 포장지의 파손여부를 확인
- (2) 제품의 형질여부 파악

2) 사용방법

Step1. 환자의 목 둘레를 잴다 (환자의 머리 및 목 부분을 중립으로 정렬을 시킨다.)

Step2. 넥칼라 높이를 조절한다.

턱받침을 Step1.에서 잰 사이즈에 따라 사이즈에 맞춰 조절하도록 한다.

Step3. 끌어당겨 고정시킨다.

넥칼라는 배송될 때 "down/unlock (밑으로/ 안잠김)" 상태로 되어있다.

첫 번째로, 파란 슬라이드 락을 눌러 위로 올려 슬라이드 락을 끌어당기고 나서, 파란색 탭을 눌러 내려 보조잠금장치를 한다.

Step4. 넥칼라를 착용한다.

머리 위치를 똑바로 중립으로 수동적으로 고정하여 넥칼라를 착용하도록 한다.

턱 밑으로 턱받침이 잘 고정되게 한다.

만일, 다른 사이즈가 필요하다면, 착용한 넥칼라를 제거하고, 사이즈를 재측정하여 다른 사이즈로 다시 착용하도록 한다.

앞쪽이 제 위치에 오도록 고정시킨 채로 넥칼라 뒷 편으로 잡아당겨 매직테이프로 고정시킨다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 반드시 의료인 또는 본 제품을 사용할 수 있는 교육을 받은 자에 의해서만 사용되어야 하며, 사용 전에 사용법을 반드시 숙지하여야 한다.
- 2) 환자의 경추 부분의 움직임을 방지하기 위해 환자의 머리 및 목 부분이 적절히 움직이지 않게 하는 것이 중요하다.
- 3) 환자가 제품을 사용하고 있는 중에 제품을 임의로 조절하지 않는다.
- 4) 본 제품은 환자의 고정용으로만 사용되어야 한다.
- 5) 본 제품은 일회용으로 제작되었으므로 제품을 재사용할 경우 교차 오염, 성능 저하의 위험이 높아질 수 있다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)