

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신16-1918호
- 품목명: 손부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

손상된 손 또는 손가락을 고정하기 위해 이용하는 기구

■ 보관 또는 저장방법

실온보관

■ 사용방법

- 1) 알맞은 사이즈의 부목을 준비한다.
- 2) 치료가 필요시 소독과 거즈를 사용한다.
- 3) 부목을 골절 부위에 알맞게 구부려 변형한다.
- 4) 골절부위에 위치를 잡고 필요에 따라 환부에 맞추어 미세 조정한다.
- 5) 부목을 완전히 고정 시킨다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 피부 가려움 같은 알레르기 반응이 있을 시 의사와 상담하여 주십시오.
- 2) 혈액 순환이 잘 이루어지지 않을 경우 다시 조절하여 고정해 주십시오.
- 3) 통증이 가라앉지 않을 경우 의사와 상담하여 주십시오.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)