

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신16-3022호
- 품목명: 환자고정보조대

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자 진료 또는 주사 시에 움직이지 못하도록 잡아주는 기구·기계. 천으로 만든 재료는 제외된다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선, 습기가 없는 곳에 보관

■ 사용방법

- 1) Head Immobilizer를 들것에 단단히 고정 시킨다.
- 2) 척추 손상이 의심되는 환자를 들것에 눕힌다.
- 3) 되도록 환자에게 변위를 가하지 않고 Head Immobilizer를 환자의 머리에 맞게 끼운다
- 4) 헤드 블록에 환자의 머리가 반듯이 고정 되어 있는지 재확인 한다.
- 5) 머리 끈과 턱 끈을 조여 단단히 고정시킨다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 최대한 환자의 움직임이 없도록 주의한다.
- 2) 목 부분이 바르지 않은 환자의 경우 상태 그대로 고정하도록 한다.
- 3) 직사광선, 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)