

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신16-3034호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

습기, 직사광선을 피할 수 있는 곳에 보관

■ 사용방법

- 1) 환자의 머리와 목을 고정시키고 부목을 환자의 등 뒤로 위치시킨다.
- 2) 환자의 양쪽 겨드랑이에 가슴고정판이 오도록 조정한다.
- 3) 환자의 등 뒤에서 다리 고정벨트를 빼낸다.
- 4) 가슴고정판을 환자의 가슴을 감싸 고정벨트를 연결한다.
- 5) 환자의 다리사이로 다리고정끈이 교차되도록 넣어 벨트를 연결하여 조여 준다.
- 6) 골반부위의 골절 시 다리 고정벨트를 교차시키지 않고 같은 방향으로 묶는다.
- 7) 고정벨트, 고정끈을 확인하고 환자의 양쪽에서 다리를 잡고 안전하게 이송한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 부목의 이상상태 여부를 확인한다.
- 2) 환자이송 시 기울이거나 들어 올릴 때 주의한다.
- 3) 임산부, 어린이에게 사용 시 상황에 맞게 주의한다.
- 4) 부목에 이물질 등이 묻어 있을 경우에는 비눗물 등의 세제를 이용하여 깨끗하게 씻은 다음 통풍이 잘되고 직사광선이 비추지 않는 곳에서 말린다.
- 5) 습기, 직사광선을 피할 수 있는 곳에 보관한다.
- 6) 본 제품은 의료기기로, 이외의 용도로 사용하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)