

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신17-10호
- 품목명: 의약품압력주입기

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

커프를 정맥주사용 수액제 용기 주위에 감아 공기 압력을 줌으로써 주사액의 주입을 도와주는 기기

■ 보관 또는 저장방법

습기가 없고 서늘한 곳에 보관

■ 사용방법

- 1) 포장 및 제품의 파손여부를 확인 한다.
- 2) 압력게이지의 상태를 확인 및 압력범위를 숙지한다.
- 3) 수액이 담겨 있는 백을 커프의 백에 연결하여 고정시킨다.
- 4) 펌프를 사용하여 공기를 주입하여 원하는 압력범위까지 증가 시킨다.
- 5) 압력게이지를 확인하고, 수액이 원활히 주입되는지 확인한다.
- 6) 사용 후 밸브를 열어 압력을 제거한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 사용 전 포장의 상태 및 제품의 파손여부를 확인한다.
- 2) 환자에게 사용하기 전에 압력게이지 및 작동여부를 확인한다.
- 3) 기기의 사용방법을 반드시 숙지한다.
- 4) 수액의 용량에 맞는 백을 사용한다.
- 5) 습기가 없고 서늘한 곳에 보관한다.
- 6) 사용목적 이외의 용도로 사용하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)