

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신19-227호
- 품목명: 일회용심전도전극

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

심장의 전기활동을 측정하기 위해 체표면에 부착하는 기구로서 일회용이다.

■ 보관 또는 저장방법

5°C에서 35°C 건냉한 곳에서 보관할 것

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 부착 전 제품의 상태를 확인합니다.
- (2) 포장으로부터 전극을 떼어냅니다.

2) 조작방법

- (1) 환자의 피부 표면에 전극을 부착합니다.
- (2) 전극이 잘 부착되도록 전극의 상태를 확인합니다.
- (3) 전극의 최대 사용시간(48시간)을 초과하여 사용하지 않습니다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 전극에 연결된 장비의 전원을 끕니다.
- (2) 장비에 연결된 전극을 분리 시킵니다.
- (3) 전극을 환자에게서 분리 시킵니다.
- (4) 본 제품은 일회용 제품으로 사용 후 폐기합니다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 사용하기 전 사용자 매뉴얼을 숙지 합니다.
- 2) 본 제품은 일회용 제품으로 재사용하지 않습니다.
- 3) 본 제품은 의료기기로 전문의료인에 의해서만 사용될 수 있습니다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)