

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신20-2477호
- 품목명: 호흡기용마스크

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

호흡기용마스크: 인공호흡을 하거나 산소를 공급하기 위하여 사용하는 마스크 등의 기구
일회용산소투여용튜브·카테터: 산소를 경비강을 통하여 투여하기 위하여 사용하는 일회용 튜브·카테터

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 주의사항

- (1) 제품의 상태에 이상이 있는지 확인한다.
- (2) 항상 모든 연결이 제대로 고정되어 있는지 확인한다.
- (3) 제품에 이상이 있을 경우 사용하지 않는다.

2) 사용방법

- (1) 환자의 입과 코 부분에 맞도록 마스크를 장착시킨다.
- (2) 스트랩을 환자의 머리뒤로 둘러 마스크를 고정시킨다.
- (3) 산소투여용튜브·카테터를 산소 공급 장치와 마스크에 연결한다.
- (4) 연결부분을 확인하고 산소 공급을 시작한다.
- (5) 연결 상태 등 이상 유무를 지속적으로 관찰한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 본 제품은 일회용이며 재사용을 금한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품에 허가되지 않은 헬리옥스를 사용하지 마십시오.
- 2) 항상 모든 연결이 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 3) 본 제품은 일회용이며 살균, 소독을 하여 재사용하지 마십시오.
- 4) 훈련을 받은 의료진만이 사용하십시오.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)