

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신21-1728호
- 품목명: 일회용산소투여용튜브·카테터

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

산소를 경비강을 통하여 투여하기 위하여 사용하는 일회용 튜브·카테터

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 주의사항

(1) 제품 사용 전 패키지나 제품에 손상이 있는지 확인 한 후 사용하도록 한다.

2) 사용방법

(1) 산소 공급 튜브를 산소 공급원에 부착한다.

(2) 원하는 유속으로 산소를 공급한다.

(3) 장치를 통과하는 가스 흐름을 확인한다.

(4) 두 개의 산소 흡입 튜브를 환자의 귀와 턱 아래에 두르고 비강에 나잘프롱(Nasal Prong)을 삽입한다.

(5) 캐놀라가 고정될 때까지 플라스틱 슬라이드 링을 환자체형에 맞춰 부드럽게 조절한다.

(6) 마지막으로 가스가 prong 양쪽으로 잘 통과하도록 환자에게 적용되었는지 확인하도록 한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

(1) 본 제품은 1회용 제품으로 재멸균 및 재멸균 처리가 가능하지 않으므로, 사용 후 반드시 폐기하도록 한다.

(2) 직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관하도록 한다.

■ 사용시 주의사항

1) 반드시 제품 사용 설명서에 따라 사용하도록 한다.

2) 본 제품은 일회용 제품으로 사용한 제품은 반드시 폐기하도록 한다.

3) 모든 커넥터가 단단히 고정되고 공기가 튜브를 통해 자유롭게 순환하는지 확인 하십시오.

4) 본 제품은 안면 외상과 PVC 알레르기가 있는 환자에게는 사용할 수 없다.

5) 개별 패키지가 손상된 경우 해당 제품을 사용하지 않도록 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)