

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신21-1953호
- 품목명: 기계식청진기

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

심장 및 폐의 소리를 듣기 위해 이용하는 기계식 청취장치.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 주의사항

- (1) 제품 사용 전 패키지나 제품에 손상이 있는지 확인 한 후 사용하도록 한다.
- (2) 본 제품은 Latex free 제품으로 알러지를 최소화 하였으나 사용자에게 따라 이를 확인하도록 한다.

2) 사용방법

- (1) ear tip을 양 쪽 귀에 꽂는다. (그림 Fig.A)

이어튜브가 본인의 귓구멍과 나란히 정렬 되어야 착용감이 편하고 소리의 전달능력도 향상된다.



Fig. A



Fig. B



Fig. C

사용자에 따라 그림 Fig. B 혹은 Fig. C와 같이 늘이거나 줄여 조절하여 착용감을 높일 수 있다.

- (2) 다이어프램 (Diaphragm)으로 진찰 : High Frequency

: 주로 100~1000Hz 주파수 범위의 소리를 들을 수 있으며 이는 기관지와 폐에서의 호흡상태와 장의 연동운동을 파악할 때 쓰인다.

벨(bell) 쪽으로 진찰 : Low Frequency

: 20~200Hz 주파수 범위의 소리를 들을 때 사용한다. 심장의 박동소리나 신체 곳곳에서 미세하게 발생하는 소리를 탐지할 때 쓰인다.



청진 하고자 하는 부위에 따라 위의 그림과 같이 양쪽으로 뒤집어 다이어프램 혹은 벨 쪽으로 사용하여 청진한다.

- (3) 장기 등의 신체 내부에서 발생하는 소리, 진동 등을 확인한다.

3) 사용 후 세척 및 소독방법

- (1) 사용한 제품 특히 이어팁이나 환자 몸에 닿는 다이어프램 부분은, 70% 이소프로필 알코올 스왑이나, 면패드 등으로 외부를 청소할 수 있으며, 소독 후에는 물에 적신 천으로 기구를 닦아 소독제가 남아 있지 않도록 한다.
- (2) 직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관하도록 한다.
 - 주변 온도: -10°C ~ +40°C 상대습도: 30~70% 비응축성
 - 보관 온도: -10°C ~ +55°C 상대습도: 10% ~ 95% 비응축성

■ 사용시 주의사항

- 1) 사용법을 숙지하지 못한 사람은 사용할 수 없다.
- 2) 건조한 실내, 실온에서 보관하도록 한다.
- 3) 청진기를 주머니에 넣어 다니거나 자주 청소하지 않을 경우 보풀이나 먼지가 쌓여 소리의 경로를 방해할 수 있으므로 오염물이 쌓이지 않도록 청진기를 정기적으로 청소하고 관리하도록 해야 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)