

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신21-357호
- 품목명: 수동식환자운반기

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자를 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

■ 보관 또는 저장방법

고온 다습 및 직사광선을 피하여 실내에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 제품의 오염 및 오물 등의 청결 상태를 확인한다.
- (2) 제품의 변형 및 하자 등으로 인한 사용 가능 여부를 확인한다.
- (3) 적정 하중 및 용도를 확인한다.
- (4) 고정벨트가 제대로 연결되는지 확인한다.

2) 사용방법

- (1) 환자를 고정판에 반듯하게 눕힌다.
- (2) 고정벨트를 사용하여 환자를 견고하게 고정시킨다.
- (3) 구조자가 2인 1조로 수평한 유지한 상태로 환자를 이송시킨다.

3) 사용 후 관리 및 보관방법

- (1) 사용 중 환자의 피나 오물, 이물질 등이 묻었는지 확인하고, 깨끗하게 닦거나 중성 세제로 세척한 후 서늘한 그늘에서 말린 다음 실내에서 보관한다.
- (2) 고온 다습 및 직사광선을 피한다.
- (3) 화공약품 및 화기로부터 격리 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 들 것에 환자를 눕힐 시, 정중앙에 똑바로 눕힌 후 반드시 환자고정 벨트로 단단히 고정시키도록 한다. 그렇지 않으면, 환자 이송 시 추락의 원인이 될 수 있다.
- 2) 하중은 허용 기준치를 초과하지 않도록 유의한다.
- 3) 반드시 2인 1조로 환자를 이송한다.
- 4) 본 제품은 의료기기임으로 다른 용도로 사용하지 않도록 한다.
- 5) 사용 시 혈액 및 타액 등으로 인한 교차 오염에 주의하도록 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)