

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-1262호
- 품목명: 의료기구용클립

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

인체조직을 제외한 의료기기 등을 일시적으로 고정하거나 잡아주기 위해 사용하는 기구. 단, 단순히 접착력만으로 부착하는 테이프형태의 제품(반창고)은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

실온 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 제품을 사용하기 전, 사용 방법 및 사용 시 주의사항을 숙지한다.
- (2) 제품의 사용기한을 확인하고 제품의 손상 부분이 있는지 확인한다.
- (3) 개봉 후에는 즉시 사용하고 사용 후에는 폐기해야 한다.

2) 사용 방법

- (1) 포장지를 벗겨 제품을 안전하게 꺼낸다.
- (2) 기관 내 튜브 삽입이 준비가 된 상태에서 환자의 입안을 벌려 치아 지지부를 치아로 물어 고정한다.
- (3) 고정 밴드를 환자 목덜미에 고정해 제품을 고정한다.
- (4) 기관 내 튜브를 튜브 삽입구에 삽입하고 조임 장치를 사용하여 튜브를 단단히 고정한다.

3) 사용 후 보관 방법

- (1) 본 제품은 일회용 제품으로 재사용을 하지 않는다.
- (2) 제품 폐기 시 관련 규정 또는 병원 규정에 따라 폐기 처분한다.

■ 사용시 주의사항

1) 사용상 주의사항

- (1) 사용 전 전극사용방법을 숙지할 것.
- (2) 구기거나 접지 말고 무거운 물건 아래 두지 말 것.
- (3) 부착시에는 적어도 전극 패취 간의 간격이 1인치가 되도록 할 것.
- (4) 흉골이나 척추 같이 뼈 돌출부위에는 겹치게 하지 말 것.

2) 사용 후 보관 및 관리방법

일회용으로 재사용, 재멸균하지 않으며 개봉한 제품은 사용하지 않았더라도 폐기한다.

- 3) 유효기간 : 제조일로부터 30 개월
- 4) 보관조건 혹은 저장방법 : 5℃에서 35℃ 건냉한 곳에서 보관할 것.
- 5) 작동가능 온도: 0℃ - 50℃
- 6) 포장단위 : 개별 1팩 포장 (폴리에틸렌과 알루미늄 실 파우치 포장)

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)