

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-1280호
- 품목명: 아네로이드식혈압계

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

팔에 감는 가압 커프, 커프내의 공기압을 조절하는 밸브, 아네로이드식 압력계로 구성되어 체외에서 혈압을 측정하는 기기

■ 보관 또는 저장방법

습하지 않은 실온에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 사용 전 사용자에게 맞는 사이즈인지 확인한다.
- (2) 커프에서 기체가 누출되지않는지 확인한다.
- (3) 환자는 다리를 꼬지 않고 편안하게 앉는다.

2) 사용방법

- (1) 팔꿈치나 팔꿈치보다 위쪽 부분에서 2~3cm인 부분 혹은 무릎 관절 위 5cm 부분에 커프를 감는다.
- (2) 커프와 측정할 부위 사이에 두손가락정도 들어갈 여유가 있는지 확인한다.
- (3) 펌프 볼을 반복적으로 눌러 기체를 주입한다.
- (4) 기체를 주입하여 게이지의 표시 압력이 약 20mmHg을 가리키면 청진기를 커프 아래에 놓는다.
- (5) 펌프 볼을 천천히 풀어 공기를 2-3mmHg/s로 배출시킨 후 맥박소리를 확인한다.
- (6) 첫 번째 맥박소리가 들릴 때 나타난 압력이 수축기 혈압이며 마지막으로 들릴 때 나타난 압력이 확장기 혈압이다
- (7) 맥박소리가 더이상 들리지 않으면 펌프 볼을 더이상 누르지 않고 펌프 볼과 커프를 분리한다.

3) 사용 후 보관 및 관리 방법

- (1) 부드러운 천으로 커프와 게이지를 닦는다.
- (2) 습하지 않은 실온에 보관한다.
- (3) 공기 튜브가 꼬이지 않게 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 제품을 300mmHg 이상으로 확장하지 않아야 한다.
- 2) 사용자가 착용하고 있는 커프를 10분이상 팽창시키지않는다.
- 3) 사용자가 불편하거나 고통을 느끼는 즉시 기기의 동작을 중단한다.
- 4) 사용자 이외의 사람이 기기를 접촉하지 않도록 주의한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)