

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-1424호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)를 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 사용 전 제품에 파손된 부분이 있는지 확인한다.
- (2) 사용할 부위에 맞는 사이즈 제품을 선택한다.
- (3) 응급 환자를 이송 시에 사용한다.

2) 사용 방법

- (1) 제품의 안쪽 면이 위를 향하도록 하고 지지할 신체 부위 뒤에 위치시킨다.
- (2) 상부 및 하부에 위치한 벨크로 테이프를 조절하여 적절하게 지지할 부위를 정한다.
- (3) 중간 부분에 남은 벨크로 테이프를 조절하여 고정 시킬 부위에 완전히 밀착시켜 고정된 자세를 유지 및 지지한다.
- (4) 사용 후 벨크로 테이프를 모두 오픈하여 제품과 신체를 분리한다.

3) 사용 후 보관 방법

- (1) 사용 후 오염이 있는 경우, 교차오염 방지를 위해 알코올이 묻어있는 솜으로 소독 후 건조하여 사용한다.
- (2) 체액 및 혈액 등이 오염되어 사용할 수 없는 경우 폐기 절차에 따라 폐기한다.
- (3) 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관한다.
- (4) 제품이 화기에 닿지 않도록 주의하여 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기로서 의사의 지시에 따라 응급 환자 이송 시에 사용한다.
- 2) 본 제품은 피부에 닿아서는 안 되며, 반드시 의복 위에 착용하여야 한다.
- 3) 사용 전 제품의 이상 유무를 확인하고 제품의 이상이 있으면 즉시 사용을 멈추고 교체한다.
- 4) 제품을 사용하기 전 제품에 혈액이나 다른 오염물질이 묻어있나 확인하고 물티슈나 형겅 등으로 가볍게 닦아준다.
- 5) 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용하지 않는다.
- 6) 장기간 사용하는 경우 환자의 피부를 모니터링해야한다.
- 7) 심하게 압박되어 불편을 느낄 경우 고정 스트랩을 느슨하게 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)