

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-1460호
- 품목명: 일회용산소투여용튜브·카테터

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

산소를 경비강을 통하여 투여하기 위하여 사용하는 일회용 튜브·카테터

■ 보관 또는 저장방법

서늘하고 건조한 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 포장과 제품의 상태를 확인한 후, 이상이 있을시 사용하지 않는다.
- (2) 제품을 사용하기 전에 모든 연결이 안정적으로 연결되어있는지 확인한다.

2) 사용방법

- (1) 엘보우 부분을 공급튜브나 필터 등 환자에 산소를 공급하는 기구에 연결한다.
- (2) 커넥터 부분을 산소 필터 및 산소공급원 등에 연결한다.
- (3) 공급원을 작동하여 공기의 흐름이 원활하게 이루어지는지 확인한 후에 환자에게 적용한다.

3) 사용 후 보관방법

- (1) 본 제품은 일회용 의료기기이므로 사용 후 폐기한다.
- (2) 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 일회용 의료기기이므로 사용 후 폐기한다.
- 2) 포장이 개봉되었거나 훼손된 경우에는 사용하면 안된다.
- 3) 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.
- 4) 교육을 받거나 자격을 갖춘 인력이 사용해야한다.
- 5) 개별 포장이 훼손된 경우 사용을 금한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)