

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-177호
- 품목명: 흡인용튜브·카테터

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브·카테터

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 주의사항

- (1) 제품 사용 전 패키지나 제품에 손상이 있는지 확인 한 후 사용하도록 한다.
- (2) 제품의 유효기간을 확인(제조일로부터 5년)하고, 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않고 폐기하도록 한다.

2) 사용방법

- (1) 커넥터를 흡입기에 연결한다.
- (2) 흡입기의 적절한 압력을 조절하고 흡입을 세팅한다.
- (3) 다른 흡인용튜브·카테터와 연결하여 환자의 이물질, 액상 또는 반고체의 물질을 튜브를 통해 흡입한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 본 제품은 1회용 제품으로 재사용 및 재멸균 처리가 가능하지 않으므로, 사용 후 반드시 폐기하도록 한다.
- (2) 직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관하도록 한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 반드시 제품 사용 설명서에 따라 사용하도록 한다.
- 2) 본 제품은 일회용 제품으로 사용한 제품은 반드시 폐기하도록 한다.
- 3) EO가스로 멸균 되었으며 재멸균 하거나 재사용 하지 마십시오.
- 4) 만일 제품 포장에 열려 있거나 손상을 입은 경우, 제품을 사용해서는 안 된다.
- 5) 고온 또는 습도가 높은 곳에 보관하지 말고, 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)