

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-2001호
- 품목명: 기계식청진기

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

심장 및 폐의 소리를 듣기 위해 이용하는 기계식 청취장치

■ 보관 또는 저장방법

온도 -20°C~70°C / 습도 85%

■ 사용방법

1) 사용 전 주의사항

제품 사용 전 패키지나 제품에 손상이 있는지 확인한 후 사용하도록 한다


2) 사용 방법

- (1) ear tip을 양쪽 귀에 조심스럽게 꽂는다. 이어튜브가 본인의 귓구멍과 나란히 정렬 되어야 착용감이 편하고 소리의 전달능력도 향상된다
- (2) 청진하고자 하는 위치에 올바른 각도로 다이어프램을 위치한다.

* 조정 가능한 다이어프램을 사용하여 저주파(Low Frequency)와 고주파(High Frequency)사이를 체스트 피스를 제거하거나 다른 것으로 교체하지 않고 단순히 다이어프램에 가해지는 압력의 차이로 전환할 수 있다.


*저주파 (Low Frequency)

: 20~200Hz 주파수 범위의 소리를 들을 때 사용한다. 심장의 박동소리나 신체 곳곳에서 미세하게 발생하는 소리를 탐지할 때 쓰이며, 저주파 소리를 들으려면 최소 압력(매우 가벼운 피부 접촉 정도)으로 들을 수 있다.

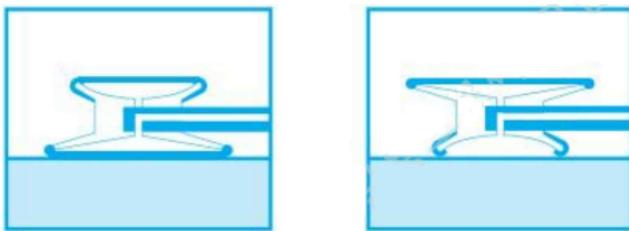

*고주파 (High Frequency)

: 주로 100~1000Hz 주파수 범위의 소리를 들을 수 있으며 이는 기관지와 폐에서의 호흡상태와 장의 연동운동을 파악할 때 쓰이며, 고주파 소리를 들으려면 횡격막에 접촉하는 동안 가슴 부분을 피부에 단단히 누릅니다.

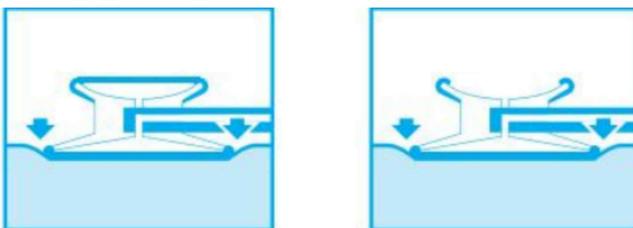

3) 사용 후 세척 및 소독방법

- (1) 필요에 따라 젖은 천으로 이어팁을 닦아 과도한 귀지 또는 기타 이물질이 튜브에 들어가지 않도록 한다.
- (2) 사용한 제품 특히 이어팁이나 환자 몸에 닿는 다이어프램 부분은, 70% 이소프로필 알코올 스왑이나, 면패드 등으로 외부를 청소할 수 있으며, 소독 후에는 물에 적신 천으로 기구를 닦아 소독제가 남아 있지 않도록 한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 제품을 떨어뜨리거나 특히 체스트피스 부분에 충격을 가하지 않도록 주의하십시오.
- 2) 청진기를 용액에 담그거나 소독하거나 용제나 오일을 바르지 마십시오.
- 3) 청진기에 심한 열이나 냉기를 가하지 마십시오
- 4) 청진기 사용의 최적의 조건은 온도 10°C~40°C(습도 85%를 넘지 않도록)이며 보관 시는 온도 -20°C~70°C(습도 85%를 초과하지 않도록 한다.)

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)