

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-914호
- 품목명: 진료용조명등

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자의 진료시에 사용하는 조명용 기구. 일반적으로 천정 또는 바닥 등에 고정되며 여러개의 조명기로 시스템의 이룰수 있다.

■ 보관 또는 저장방법

실온보관

■ 사용방법

1) 사용 전 주의사항

- (1) 사용 전 사용방법을 숙지한다.
- (2) 사용 전 본체 및 구성품이 누락되거나 파손된 부분은 없는지 확인한다.

2) 사용방법

- (1) 램프 커버를 돌려 본체와 분리한다.
- (2) AAA형 건전지 2개를 본체에 삽입하고 램프 커버를 결합한다.
- (3) 제품의 클립을 눌러 전원 스위치를 켜다.
- (4) 램프방향을 조절하여 사용한다.
- (5) 사용 후 클립을 눌러 전원 스위치를 끈다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 세척을 위해 알콜에 완전히 담글 수 있는 폴메탈 디자인이며 알콜에서 건진 후 부드러운 천으로 제품을 닦아낸 후 실온에서 보관한다.
- (2) 장시간 사용하지 않을 때는 건전지를 본체에서 분리하여 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하면 안된다.
- 2) 배터리를 제품에 장착 시, +,-를 꼭 확인한 후 장착하도록 한다. 반대로 장착 시, 고장의 원인이 되며, 이 경우 수리비가 청구되거나 수리가 불가할 수 있다.
- 3) 라이트의 밝기가 어두워지거나 손전등이 반응하지 않으면 배터리를 교체해야 한다.
- 4) 내부 건전지 부품이 물에 닿지 않도록 주의한다.
- 5) 눈에 장시간 사용을 피한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)