

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-948호
- 품목명: 아네로이드식혈압계

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

팔에 감는 가압 커프, 커프내의 공기압을 조절하는 밸브, 아네로이드식 압력계로 구성되어 체외에서 혈압을 측정하는 기기

■ 보관 또는 저장방법

실온보관

■ 사용방법

1. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 사용자에게 맞는 사이즈인지 확인한다.
- 2) 커프에서 기체가 새지 않는지 확인한다

2. 사용 방법

- 1) 팔꿈치 혹은 팔꿈치보다 위쪽 부분에서 2~3cm 위로 커프를 감는다.
- 2) 커프와 측정할 부위 사이에 두손가락정도 들어갈 여유가 있는지 확인한다.
- 3) 공기 밸브를 시계 방향으로 돌려 기체를 주입한다.
- 4) 커프의 압력이 약 20mmHg이 될때까지 팽창시키고 청진기를 커프 아래에 놓는다.
- 5) 공기밸브를 천천히 풀어 공기를 2-3mmHg/s로 배출시킨 후 맥박소리를 확인한다.
- 6) 첫 번째 맥박소리가 들릴 때 나타난 압력이 수축기 혈압이며 마지막으로 들릴 때 나타난 압력이 확장기 혈압이다
- 7) 맥박소리가 더이상 들리지 않으면 공기밸브를 다 빼낸다.

3. 사용 후 보관 방법

- 1) 습하지 않은 곳에 보관한다.
- 2) 부드러운 천으로 닦아낸 후 실온에 보관한다.
- 3) 공기 튜브가 꼬이지 않게 보관한다.

■ 사용시 주의사항

1. 제품을 300mmHg 이상으로 확장하지 않아야 한다.
2. 사용자가 착용하고 있는 커프를 10분이상 팽창시키지않는다.
3. 사용자가 불편하거나 고통을 느끼는 즉시 기기의 동작을 중단한다.
4. 사용자 이외의 사람이 기기를 접촉하지 않도록 주의한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)