

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신22-996호
- 품목명: 지혈대

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자의 사지를 묶을 수 있는 끈이나 지혈만을 하는 튜빙 등으로 구성된 기구

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관

■ 사용방법

가. 사용 전 주의사항

- 1) 지혈대가 뜯어지거나 손상된 부분이 없는지 확인한다.
- 2) 사용 전 사용설명서를 숙지한 후 사용하도록 한다.

나. 사용방법

1) TM-A003 (벨크로형)

- ① 지혈대를 펼치고, 적용할 부위에 두른다.



- ② 지혈대 양쪽 벨크로를 붙여 고정한다.



- ③ 아래 그림과 같이 돌려 감아 고정시키도록 한다.



2) TM-A004 (버클형)

- ① 지혈대 위치를 잡고 손목이나 발목 밑으로 지혈대를 두른 후 버클에 걸쇠를 넣어 원형루프를 만든다.



② 밴드를 잡아 당겨 고정 및 지혈한다.



③ 사용 후, 아래 사진과 같이 버튼을 누르면 버클이 자동으로 쉽게 풀린다.



다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 알콜솜으로 클립 및 밴드 부분을 닦아 준 후 습하지 않은 곳에 보관한다.
- 2) 버클형의 경우 버클 손상을 줄이도록, 버클을 잠근 상태에서 보관한다.
- 3) 오염이 있을 경우 중성세제를 사용하여 연결 끈 부위를 손세탁하고, 직사광선을 피해 습하지 않은 곳에서 자연 건조 한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 환자에게 부적절하게 강한 압박이 가해지지 않도록 조절한다.
- 2) 밴드에 강한 압박이 가해진 상태에서 장시간 보관하면 밴드의 변형이 올 수 있으므로 보관 시 유의하도록 한다.
- 3) 사용 목적 이외의 용도로 사용하지 않는다.
- 4) 혈액감염의 위험이 있을 경우 사용하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)