

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신23-1093호
- 품목명: 재사용가능범용수동식의료용핀셋

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

진료시에 일반적으로 사용되는 핀셋으로 재사용이 가능하다.

■ 보관 또는 저장방법

실온보관

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 본 제품을 사용하기 전에 손상여부와 세척 및 멸균여부 등을 면밀하게 확인한다.
- 2) 사용 전 제품이 멸균 되었는지 확인한다. (멸균방법: 143°C 에서 1~10분 동안 습열멸균)
- 3) 사용 방법에 따라 적절한 부위에 사용해야 한다.

나. 조작방법

- 1) 제품의 손잡이를 엄지와 검지로 잡는다.
- 2) 손잡이를 조작하여 조직 등을 잡아 고정시킨다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 세척방법  
제품 사용 후, 최대한 빨리 제품을 물로 세척 한다.
- 2) 멸균방법

멸균방법	습열멸균
멸균온도	143°C
멸균시간	1~10분
멸균압력 (해당하는 경우)	해당없음

- 3) 보관방법  
부드러운 천으로 닦아낸 후 실온에 보관한다.
- 4) 관리방법  
해당없음

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 본 제품을 본래의 사용목적 이외의 다른 용도로 사용하면 안된다.
- 3) 사용 전에는 반드시 세척 및 멸균한 이후에 사용한다. (멸균방법: 143°C 에서 1~10분 동안 습열멸균)

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)