

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신23-1303호
- 품목명: 수동식환자운반기

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자를 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

■ 보관 또는 저장방법

자연 상태에서 건조 시킨 후 보관

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

1) 사용하기 전 제품 손상여부를 면밀하게 확인한다.

나. 조작방법

- 1) 추가 손상이 의심되는 환자에 무리가 가지 않도록 환자 등 부분으로 매트를 넣어 조심스럽게 매트 위로 옮긴다.
- 2) 위, 아래 2개의 원터치 방식의 환자고정벨트를 환자에 맞춰 고정시킨다.
- 3) 환자 이송 시에는 앞, 뒤로 두 사람이 양 쪽 사이트에 있는 손잡이의 균형을 맞춰 들도록 한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

1) 세척방법

사용 후, 환자로부터 감염위험을 예방하기 위해 중성세제로 세척 후, 마른 수건으로 닦는다.

2) 보관방법

자연 상태에서 건조 시킨 후 보관한다.

3) 관리방법

해당없음

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 환자를 고정대 위에 옮긴 후 반듯하게 눕힌다.
- 3) 환자의 허용중량이 160 kg 이하 이므로 이를 고려하도록 한다.
- 4) 환자 이송 전 환자고정벨트가 제대로 채워졌는지 확인 후 이송하도록 한다.
- 5) 환자 이송 시에는 반드시 앞, 뒤로 2명이 균형을 맞추어 이송하도록 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)