

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신23-1920호
- 품목명: 압박용밴드

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

혈액이 괴는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사용하는 스포츠 용품 또는 환부의 보존, 보호, 처치 등의 목적으로 사용하는 붕대 등은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

실온보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 본 제품을 사용하기 전에 손상여부 및 멸균여부 등을 면밀하게 확인한다.
- (2) 신체 부위에 맞는 제품인지 확인한다.

2) 조작방법

- (1) 신체 부위에 밴드(Elastic band)를 감는다.
- (2) Pressure bar에 밴드를 끼운 후 반대 방향으로 감는다.
- (3) Closure bar를 이용하여 밴드를 고정한다.



3) 사용 후 보관 및 관리 방법

- (1) 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않고 폐기한다. (재사용 금지)

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 제품에 오염이 있거나 파손, 변형 시 사용해서는 안 된다.
- 3) 사용 목적 이외의 사용을 금지한다.
- 4) 포장에 손상이 있거나 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 5) 본 제품은 환부에 직접 접촉하여서는 안된다
- 6) 본 제품은 환부의 보존, 보호, 처치, 지혈 등의 목적으로 사용하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)