

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신23-783호
- 품목명: 지혈대

작성연월 : 2025년 01월 03일

## ■ 사용목적

환자의 사지를 묶을 수 있는 끈이나 지혈만을 하는 튜빙 등으로 구성된 기구

## ■ 보관 또는 저장방법

실온보관

## ■ 사용방법

### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용하고자 하는 신체 부위에 맞는 제품을 선택한다.
- 2) 사용하기 전에 제품의 포장 손상 및 제품 손상 여부를 확인한다.
- 3) 사용하기 전에 손을 깨끗이 씻거나 장갑을 착용한다.

### 나. 조작방법

- 1)환자의 지혈 부위에 맞는 사이즈의 지혈대를 펼치고, 적용할 부위에 두른다.
- 2)지혈대를 적당한 강도로 당긴 후 양쪽 벨크로를 붙여 고정한다.
- 3)고정 벨크로를 이용하여 강도의 정도를 조절한다.

### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않고 폐기한다. (재사용 금지)

## ■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 사용 중 피부 과민증상이 나타나는 경우 즉시 사용을 중단한다.
- 3) 제품을 사용할 때 해당 지혈 부위에 직접 닿지 않도록 주의한다. 반드시 지혈 부위에 별도의 거즈나 솜을 댄 후 사용하여야 한다.
- 4) 고탄력 고무 재질로 인해 어느 정도 기간 동안은 탄력이 유지되나, 장시간 사용 시에는 지혈대 하부 조직의 손상이 생길 수 있으므로 가능한 2시간 이상 환자에게 사용하지 않도록 한다.

## ■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)