

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신24-1769호
- 품목명: 혈압검사용커프

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자의 혈압을 검사하는 기기에 연결하여 측정하는 커프로서, 커프 내의 공기주머니를 가압하거나 감압하는 기구

■ 보관 또는 저장방법

어둡고, 서늘하고 건조한 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 제품의 유효기간을 확인하고 사용한다.
- (2) 사용자에게 맞는 사이즈인지 확인한다.
- (3) 커프에서 기체가 새지 않는지 확인한다.
- (4) 사용설명서를 숙지하고 사용하도록 한다.
- (5) 숙련된 전문가의 판단에 따라 적절한 크기의 제품을 선택하여 사용한다.

2) 조작방법

- (1) 팔꿈치 혹은 팔꿈치보다 위쪽 부분에서 2~3cm 위로 커프를 감는다.
- (2) 커프와 측정할 부위 사이에 두손가락 정도 들어갈 여유가 있는지 확인한다.
- (3) 압력게이지의 밸브를 통해 기체를 주입한다.
- (4) 공기의 압력이 약 20mmHg이 될 때까지 팽창 시키고 청진기를 커프 아래에 놓는다.
- (5) 공기밸브를 천천히 풀어 공기를 2-3mmHg/s 로 배출시킨 후 맥박소리를 확인한다.
- (6) 첫 번째 맥박소리가 들릴 때 나타난 압력이 수축기 혈압이며 마지막으로 들릴 때 나타난 압력이 확장기 압력이다.
- (7) 맥박소리가 더 이상 들리지 않으면 공기밸브를 빼낸다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 본 제품은 어둡고, 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.
- (2) 보관 시 자외선, 햇빛 및 형광등에 장기간 노출되지 않도록 한다.
- (3) 블래더(공기튜브)가 꼬이지 않게 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 압력게이지의 압력을 300mmHg 이상으로 확장하여 사용하지 않는다.
- 2) 커프를 10분이상 팽창하여 사용하지 않는다.
- 3) 사용자가 불편하거나 고통을 느끼는 즉시 기기의 동작을 중단한다.
- 4) 사용자 이외의 사람이 기기를 접촉하지 않도록 주의한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)