

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신24-1988호
- 품목명: 지혈대

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자의 사지를 묶을 수 있는 끈이나 지혈만을 하는 튜빙 등으로 구성된 기구

■ 보관 또는 저장방법

습하거나 햇빛이 강하지 않은 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 사용하고자 하는 신체 부위에 맞는 제품을 선택한다.
- (2) 사용하기 전에 제품의 포장 손상 및 제품 손상 여부를 확인한다.
- (3) 사용하기 전에 손을 깨끗이 씻거나 장갑을 착용한다.
- (4) 제품의 이상 여부, 벨트 꼬임 여부를 잘 확인한다.

2) 전극패치에 있는 보호형 재킷을 천천히 벗겨낸다.

- (1) 부상 부위를 확인 후 부상 부위 위쪽으로 제품을 위치 시킨다.
- (2) 손으로 스트랩을 잡고 끝까지 조인다.
- (3) 출혈이 멈출 때까지 지혈 붓을 돌린다.
- (4) 필요할 경우 클립에 지혈 붓을 고정시킨다.
- (5) 티링 락 안으로 지혈 붓을 끼워 한번 더 고정시킨다.
- (6) 락 걸림을 확인 후 지혈 시간을 메모한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않고 폐기한다. (재사용 금지)
- (2) 제품은 습하거나 햇빛이 강하지 않은 곳에 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 사용 중 피부 과민증상이 나타나는 경우 즉시 사용을 중단한다.
- 3) 제품을 사용할 때 해당 지혈 부위에 직접 닿지 않도록 주의한다. 반드시 지혈 부위에 별도의 거즈나 솜을 댄 후 사용하여야 한다.
- 4) 의류 내의 주머니 속 고체 물질 위에 압박하지 않게 주의한다.
- 5) 장시간 사용시 과도한 압박에 주의 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)