

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신24-2349호
- 품목명: 지혈대

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자의 사지를 묶을 수 있는 끈이나 지혈만을 하는 튜빙 등으로 구성된 기구

■ 보관 또는 저장방법

실온보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 사용하기 전에 제품의 포장 손상 및 제품 손상 여부를 확인한다.
- (2) 사용하기 전에 손을 깨끗이 씻거나 장갑을 착용한다.
- (3) 의류 내의 주머니 속 고체 물질 위에 압박하지 않게 주의한다.
- (4) 제품의 이상여부, 블래더(공기주머니), 벨트 고임 여부를 잘 확인한다.

2) 조작방법

- (1) 부상 부위(골반, 서혜부, 겨드랑이 및 골반의 출혈)를 확인 후 제품을 위치 시킨다.



- (2) 레더 스트랩의 빨간 부분이 버클의 빨간 부분에 만날 때 까지 연결한다.
- (3) 블래더(공기주머니)부분을 지혈할 부위에 맞춘다.



- (4) 스트랩을 고리에 넣어 끈처리를 한다.



- (5) 래치 버클을 당겨 완전 조인다.(3~5번 클릭)



- (6) 펌프를 이용해 블래더(공기주머니)를 게이지의 녹색 표시까지 부풀린다.
- (7) 지혈 시간은 접합부(겨드랑이, 사타구니) 4시간, 복부는 2시간 이내로 한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않고 폐기한다. (재사용 금지)

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 사용 중 피부 과민증상이 나타나는 경우 즉시 사용을 중단한다.
- 3) 제품을 사용할 때 해당 지혈 부위에 직접 닿지 않도록 주의한다. 반드시 지혈 부위에 별도의 거즈나 솜을 댄 후 사용하여야 한다
- 4) 복부 배치에 사용하기 위한 금기 사항
복부 대동맥류, 임산부
- 5) 권장 적용 시간
접합부(겨드랑이, 사타구니등) : 4시간 이내
복부 : 2시간 이내
- 6) 의류 내의 주머니 속 고체 물질 위에 압박하지 않게 주의한다.
- 7) 장시간 사용시 과도한 압박에 주의 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)