

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신25-1003호
- 품목명: 기계식청진기

작성연월 : 2025년 05월 20일

■ 사용목적

심장 및 폐의 소리를 듣기 위해 이용하는 기계식 청취장치

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관


■ 사용방법

1) 사용 전 주의사항

- (1) 제품의 소독, 청결 상태를 반드시 확인한다.
- (2) 제품의 사용설명서를 숙지하고 사용하도록 한다.
- (3) 숙련된 전문가의 판단에 따라 제품의 사용 용도에 맞게 사용한다.

2) 조작방법

- (1) 제품의 상태가 양호한지 확인한다.
 - (2) ear tip을 양쪽 귀에 꽂는다. (헤드셋은 인체의 착용감에 맞게 15도 꺾여있다)
 - (3) 고주파를 음을 들을 수 있는 다이어프램과 저주파음을 들을 수 있는 벨쪽으로 진찰 할 수 있다.
- ① 다이어프램 (Diaphragm)으로 진찰

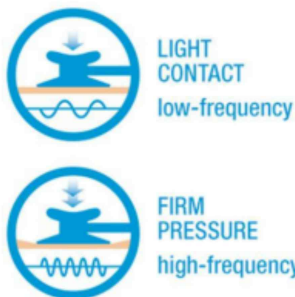

다이어프램으로 고주파 모드와 고주파 모드를 전환할 수 있다.

살짝 누르면 저주파, 강하게 누를시 고주파 모드(AFD Technology)

② 벨쪽으로 진찰

저주파의 청음을 들을 때 사용한다.



청진 하고자 하는 부위에 따라 위의 그림과 같이 양쪽으로 뒤집어 다이어프램 혹은 벨 쪽으로 사용하여 청진한다.

- (4) 내부에서 발생하는 소리, 진동 등을 확인한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

(1) 사용한 제품 특히 이어팁이나 환자 몸에 닿는 다이어프램 부분은, 70% 이소프로필 알코올 스왑이나, 면패드 등으로 외부를 청소할 수 있으며, 소독 후에는 물에 적신 천으로 기구를 닦아 소독제가 남아 있지 않도록 한다.

(2) 직사광선을 피해 습하지 않은 곳에 보관하도록 한다.

- 주변 온도: -10°C ~ +40°C 상대습도: 30~70% 비응축성
- 보관 온도: -10°C ~ +55°C 상대습도: 10~95% 비응축성

■ 사용시 주의사항

1) 사용법을 숙지하지 못한 사람은 사용할 수 없다.

2) 건조한 실내, 실온에서 보관하도록 한다.

3) 청진기를 주머니에 넣어 다니거나 자주 청소하지 않을 경우 보풀이나 먼지가 쌓여 소리의 경로를 방해할 수 있으므로 오염물이 쌓이지 않도록 청진기를 정기적으로 청소하고 관리하도록 해야 한다

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)