

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신25-598호
- 품목명: 수동식환자운반기

작성연월 : 2025년 03월 28일

■ 사용목적

환자를 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

■ 보관 또는 저장방법

습하거나 햇빛이 강하진 않은곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 사용 전 사용방법을 숙지한다.
- (2) 사용 전 본체 및 벨트, 손잡이 등 파손된 부분은 없는지 확인한다.

2) 조작방법

- (1) 접혀있는 제품을 고정하고 있는 버클을 풀어 제품을 펼친다.
- (2) 손잡이를 잡고 들어 올려 발로 제품의 지지대를 밀어 제품을 펼쳐 고정시킨다.
- (3) 이송할 환자를 눕힌 후 고정벨트로 조여 환자를 고정시킨다.
- (4) 환자를 이송할 구조자는 양쪽으로 한명씩 손잡이를 잡고 환자를 이송시킨다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 제품의 표면에 세척제 나 살균제를 뿌려 부드러운 솔로 문질러 세척한다.
- (2) 제품은 습하거나 햇빛이 강하진 않은곳에 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 제품이 파손된 부분이 있는지 확인한다.
- 2) 본 제품을 본래의 사용목적 이외의 다른 용도로 사용하면 안된다,
- 3) 사용 전에는 반드시 세척한 이후에 사용한다.
- 4) 올바른 사용을 위해 교육을 받은 전문가가 사용하여야 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)